



Fabrication
100% VOSGIENNE

Ces masques en tissu sont conçus selon les normes AFNOR (Catégorie 1) et certifiés par la Direction Générale de l'Armement. **Ils sont en cours de certification au-delà de 5 lavages.** Avant la première utilisation, les laver une première fois. Il est recommandé de suivre notamment les quelques consignes suivantes qui garantiront l'efficacité optimale d'utilisation.

**Notice à télécharger
sur le site d'ARES**

www.ares88.fr



LAVER SES MAINS

Avant et après chaque manipulation du masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser une : solution hydroalcoolique



POSITIONNER LE MASQUE


Positionner le masque sur le visage en le tenant de l'extérieur et passer les élastiques derrière la tête en les séparant pour un meilleur maintien.

Abaisser le bas du masque sous le menton.

Une fois ajusté,

Ne plus toucher le masque avec les mains

Et ne pas le positionner en attente sur le front ou le menton.

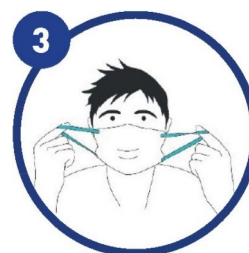

RETIRER LE MASQUE

Retirer le masque en saisissant les élastiques sans toucher la partie avant du masque.



LAVER LE MASQUE CHAQUE JOUR

Le cycle complet [mouillage, lavage, rinçage] doit être au minimum de 30 minutes avec une température de lavage de 60° C. Le masque doit être séché en moins de 2 heures, idéalement en sèche-linge sinon au sèche-cheveux.

**ATTENTION
LE PORT DU
MASQUE NE
SE SUBSTITUE
PAS AUX
GESTES
BARRIERES**

LES GESTES BARRIERE A ADOPTER



Se laver régulièrement les mains



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter



Saluer sans serrer la main, éviter les embrassades.